

Maniquí para entrenamiento en CPR "BRAYDEN"

BRAYDEN



Completamente conforme con las Guidelines AHA y ERC (2015)

Diemer

El propósito final de la RCP es mantener un flujo de sangre oxigenada al cerebro durante un paro cardíaco para prevenir daños serios al mismo.

“BRAYDEN” es el primer Maniquí para prácticas de RCP con función visual durante el CPR de la circulación sanguínea desde el corazón al cerebro

Además, con la ayuda del Maniquí de prácticas de RCP “BRAYDEN”, no solo aprenderán fácilmente como realizar un RCP correctamente en caso de necesidad, sino que gracias a las innovaciones que incorpora, las habilidades aprendidas se recordarán toda la vida.


BRAYDEN

Completamente conforme con las Guidelines AHA y ERC (2015). Se ilumina para mostrar el volumen de sangre que las compresiones del pecho hacen circular solamente se ilumina completamente si son de $>5\text{cm}$ (modo AHA) o entre $5\text{-}6\text{ cm}$ (modo ERC). Las luces indicadoras de la circulación sanguínea se iluminarán para mostrar el flujo desde el corazón al cerebro, la velocidad varía en función de la profundidad y velocidad de las compresiones entre la tasa de 100 a 120 compresiones por minuto. Luces indicadoras de la calidad de la RCP. Desviación/liberación incompleta si existe retroceso insuficiente entre compresiones o está apocando mal en el pecho la luz de calidad no se encenderá.

Señales luminosas RCP

Estas señales solo lucirán cuando la compresión y la velocidad coincidan correctamente con los valores de referencia. Cuando uno de ellos, por ejemplo, la presión de la compresión o la velocidad no sea correcta, entonces las señales no se iluminarán.

Al estar construido con la tecnología más avanzada “BRAYDEN” hace posible entrenar a aprendices de cualquier nivel, siendo fácil y simple aprender la manera correcta de realizar un RCP. Aprenderá simplemente, siguiendo atentamente las señales luminosas y viendo como éstas reaccionan a sus prácticas de RCP.

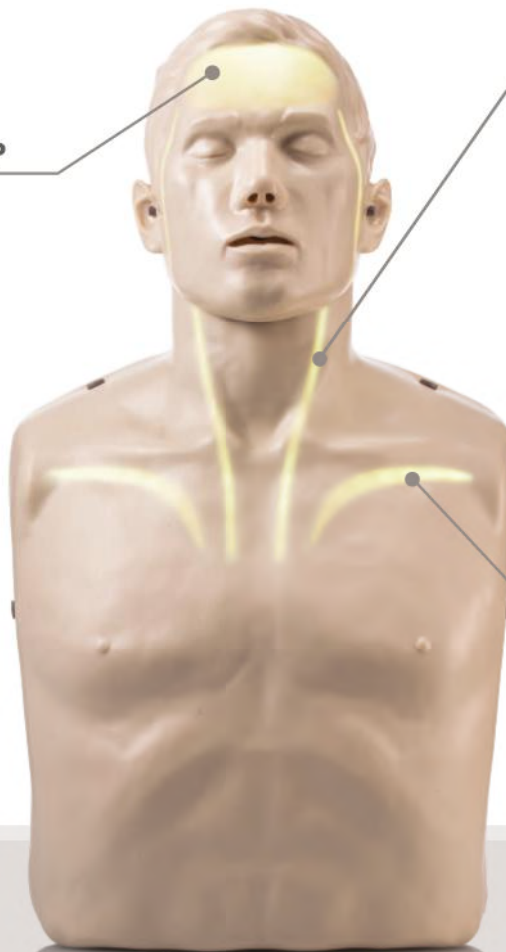

Indicadores de la circulación sanguínea

Estas señales luminosas indican el flujo sanguíneo desde el corazón hasta el cerebro, para que los aprendices puedan fácilmente observarlo mientras se realiza un RCP. Las señales se iluminarán en proporción directa a la profundidad y velocidad de las compresiones, ayudando a mejorar sus sesiones prácticas de RCP.

Indicadores de compresión

Estas señales luminosas relacionan directamente la profundidad y velocidad de las compresiones. En otras palabras, las señales del pecho lucirán en proporción directa con la profundidad y velocidad de las compresiones al igual que las señales de circulación sanguínea.

Por ejemplo, cuando se realiza correctamente un RCP, todas las señales luminosas del pecho se iluminarán, sin embargo, estas señales se iluminarán en proporción con la calidad del RCP.

Diemer

Tamaño : 32 x 59 x 21 cm
Peso : 3.1 kg (Incluyendo las baterías)
Energía: Baterías, Adaptador AC (Opción)

FUNCIONES BÁSICAS

El Maniquí para prácticas de RCP "BRAYDEN" incorpora las siguientes funciones para el Soporte Vital Básico

Inclinación realista de la cabeza y elevación de la barbilla para abrir las vías aéreas
 Elevación del pecho con ventilación correcta
 Reacción audible ("clic") con profundidad de compresión correcta



Movimiento del pecho muy realista con ventilación



Inclinación de cabeza y elevación del mentón para abrir la vía aérea



Conductos nasal y oral que permiten pinzar la nariz



Marcas anatómicas (esternón, caja torácica, horquilla esternal)



Piel y accesorios inocuos.



Se limpia rápida y fácilmente



Señal audible que ayuda a corregir la profundidad de la compresión (Cliker on/off)



Etiquetas para registro y gestión de la información



Dos maneras de funcionamiento: baterías o alimentador AC/DC

Cambio del pulmón desechable (Extraíble)



Previamente levante la barbilla



Inserte el pulmón artificial En su localización




Coloque el pulmón en el pecho Según marca las guías.

Maniquí para entrenamiento en CPR "BRAYDEN"

BRAYDEN

CONTENTS

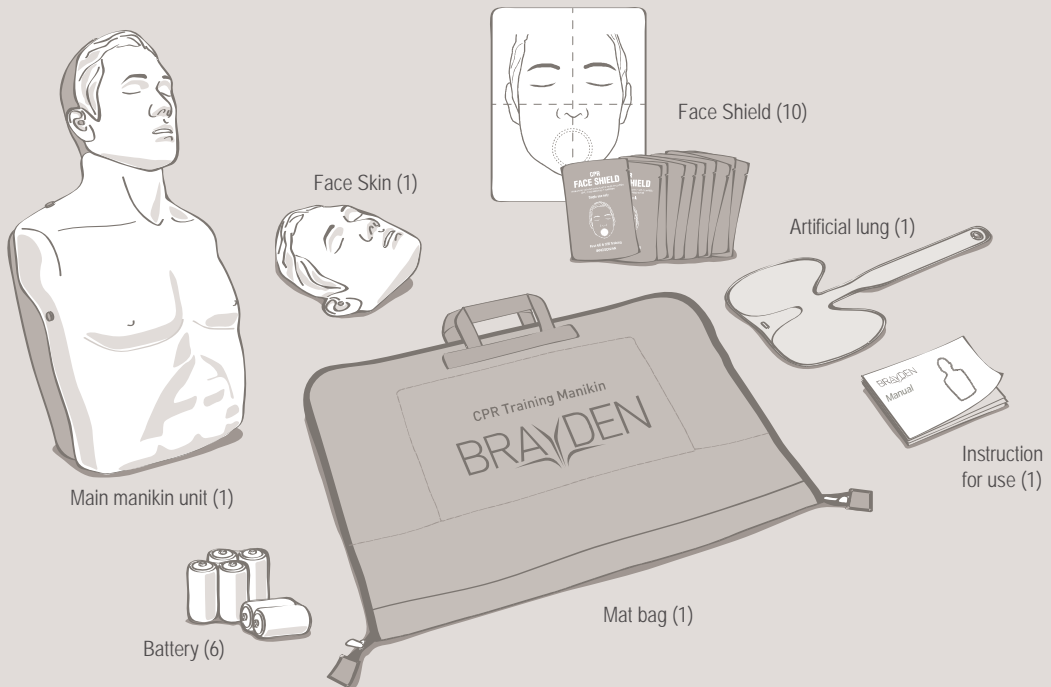

Diemer sl.

C/ Zubiete n.º 44 – Polg ISASI – Entreplanta Nave 4

48192 Gordexola – Vizcaya

Tlfn. 946690037 – Fax. 946690357

Email. info@diemer.es

www.diemer.es - www.materialmedico24.es

BE BRAVE!

A brave decision makes you to save
someone you love.