

PACKAGING



PACK INDIVIDUAL

- 1 Practi-MAN
- 1 Manual de usuario y Preguntas frecuentes
- 5 pulmones
- 2 válvulas
- 1 bolsa de transporte con almohadilla




MULTI PACK

- 4 Practi-Man
- 4 Manuales de usuarios y Preguntas Frecuentes
- 20 pulmones
- 8 válvulas
- 1 bolsa de transporte para 4 unidades


SIMULADOR RCP PRACTI-MAN

Diemer

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS

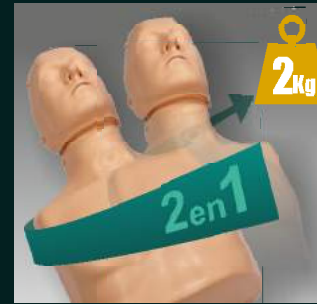

- **DOS SIMULADORES EN UNO**
Para realizar la práctica RCP de adulto y niño con un solo simulador.

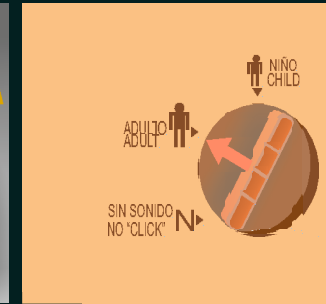

- **SELECTOR EXCLUSIVO DE TRES POSICIONES**
Adulto, niño y test (no click).



- **RESPIRACIÓN REAL**
Exclusivo sistema de respiración incluyendo nariz con función real.

CERTIFICADO DE GARANTIA



Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad antes de salir de fábrica. No obstante, de surgir cualquier problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas defectuosas en origen, le rogamos lea las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor oficial de su zona.

Por este certificado de garantía, ENFAVI, S.L. garantiza que este producto se encuentra libre de defectos materiales y de mano de obra en el momento de su compra por un período de DOS AÑOS desde su entrega.

Si durante el período de validez de la garantía, el producto presentara algún defecto atribuible al proceso de fabricación, debido a materiales y/o mano de obra, el consumidor habrá de informar al distribuidor oficial en el plazo máximo de diez días desde que tuvo conocimiento del defecto, pudiendo optar/decidir el distribuidor oficial entre la sustitución de la pieza dañada o su reparación.

CONDICIONES DE LA GARANTIA:

Datos y documentación: Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra y el albarán de entrega, siempre que la entrega del producto sea posterior a la fecha de compra, debiendo facilitar expresamente los siguientes datos: nombre completo y dirección del comprador.

Exclusiones: Esta garantía excluye expresamente los casos siguientes:
-Daños y/o averías sufridas por el producto como consecuencia del mal uso, caídas, dolo o negligencia del usuario, incluyendo la utilización del producto para fines distintos del uso a que está destinado.
-Daños y/o averías producidos por el uso de agentes externos como cal u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos.
-Daños y/o averías debidos a un mantenimiento inadecuado o a la falta de limpieza.
-Daños y/o averías derivadas del uso de recambios no originales de la marca.

Ámbito geográfico: La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por ENFAVI, S.L. o por un distribuidor asignada por ENFAVI, S.L..

Anulación de la garantía: La garantía del producto quedará invalidada:
-En los supuestos de daños causados por las reparaciones llevadas a cabo por personas ajenas al servicio técnico autorizado por ENFAVI, S.L., así como si se reemplazan o se utilizan piezas adicionales o accesorios que no sean originales.
-Por manipulación de los datos de la factura, ticket de compra o albarán de entrega.



- **FÁCIL Y RÁPIDO MONTAJE**
El maniquí consta de 4 partes: cabeza, pulmón, válvula y torso que se pueden ensamblar en sólo unos segundos.



- **FORMACIÓN DEA**
El uso de parches no deja residuos en la piel.



- **MÁXIMA HIGIENE**
Ayuda a prevenir cualquier contagio durante la práctica RCP.



PRACTI-MAN
CPR TRAINING SOLUTIONS



1. Retirar el peto.



2. Unir la boquilla con la válvula.



3. El pulmón debe ser colocado por debajo de la varilla metálica, nunca por encima.



4. Presionar las pestañas de la parte superior de la pieza en la cabeza y presionar hasta oír el clic.



5. Conectar la cabeza al torso encajando la varilla metálica en los enganches situados en ambos lados del cuello.



6. Colocar el pulmón sobre el torso y comprobar:
Que la pegatina se fija en la marca circular
Que el pulmón descansa a holgadamente sobre el cuello



7. Colocar el peto.

Para asegurar una máxima higiene, el fabricante recomienda la limpieza de Practi-Man después de cada uso siguiendo las instrucciones a continuación:



Es necesario limpiar el simulador desinfectando los labios y la cara, separando la máscara de la cabeza después de cada ejercicio realizado por el alumno.



Para una desinfección más completa, sumergir la máscara en un recipiente con producto desinfectante, limpiar cuidadosamente y mantener seca para un correcto uso.



Después de cada uso, la válvula de Practi-Man se debe desinfectar y dejar secar para un correcto funcionamiento.



El pulmón de Practi-Man es semidesechable y apto para realizar una sesión de entrenamiento por un grupo de varias personas sin necesidad de cambiarlo. Si durante la práctica el pecho deja de elevarse, compruebe que el pulmón no está humedecido, en cuyo caso se debe sustituir por uno nuevo.

REPUESTOS DE PRACTI-MAN



PULMÓN
(Ref. SP-001)



VÁLVULA
(Ref. SP-002)



MÁSCARA
(Ref. Face-MB)



PETO
(Ref. Chest-MB)

PROTECCIÓN DURANTE LA PRÁCTICA RCP



La protección durante la formación, se complementa con el uso de la mascarilla protectora para la práctica del boca a boca.



Caja dispensadora de 100 unidades

Para asegurar una limpieza correcta del simulador, utilice las toallitas desinfectantes.